

Consignes d'utilisation Du fauteuil roulant



Consignes d'utilisation

LES FREINS

Les roues arrière sont équipées de freins mécaniques.

Le blocage des roues s'opère en appuyant sur les leviers situés sous les accoudoirs, près de l'assise.

Pour une meilleure sécurité il convient, lorsque le fauteuil est immobilisé, de bloquer les deux roues.

Pour faciliter les manœuvres et éviter toute détérioration des freins ou des revêtements, il faut bien évidemment penser à débloquer les freins avant tout déplacement.



PLIER SON FAUTEUIL

Repliez les repose-pieds et repose-jambes en position verrouillée.

Ensuite, pivotez et relevez les palettes à la verticale.

Enfin, fermez le fauteuil en tirant avec les deux mains la toile d'assise vers le haut, en prenant la toile par le devant et par l'arrière de l'assise.

DEPLIER SON FAUTEUIL

Appuyez sur les tubes latéraux supportant la toile de siège (en prenant garde de positionner les mains à l'intérieur de l'assise) jusqu'à ce que le fauteuil soit entièrement ouvert.

Serrez les freins, ouvrez les repose-pieds et repose-jambes pour vérifier la garde au sol.

du fauteuil roulant manuel

LES FREINS



CONSEILS

- Vérifiez le bon fonctionnement des freins avant de vous servir du fauteuil roulant.
- Avant d'entrer ou de sortir du fauteuil roulant, serrez les freins.
- Serrez les freins avant de déplacer un objet.
- N'utilisez pas les freins en tant que freins de ralentissement.
- Ne surgonflez pas les pneus afin d'éviter tout risque d'éclatement.
- Veillez à régler l'inclinaison du dossier en fonction du confort recherché, à l'aide des gâchettes.
- Pour assurer sécurité et confort, réglez bien les palettes des repose-pieds afin que ceux-ci soient à l'horizontale.
- Les pneus du fauteuil étant adaptés suivant différents paramètres : taille, poids... ils ne nécessitent généralement pas de surveillance de pression car pleins après pression.

POUR EVITER TOUT BASCULEMENT

- Ne tentez pas d'attraper des objets au sol en vous avançant sur le siège ou en vous baissant entre les genoux.
- Ne vous penchez pas trop en arrière pour atteindre des objets.
- Ne donnez pas d'à-coup avec votre corps en avant et en arrière.
- Ne basculez pas le fauteuil roulant sans aide extérieure.
- N'empruntez pas d'escalier roulant
- Les pneus du fauteuil étant adaptés suivant différents paramètres : taille, poids... ils ne nécessitent généralement pas de surveillance de pression car pleins après pression.

ENTRETIEN

Il est recommandé d'utiliser hebdomadairement une éponge légèrement humide ou une lingette imprégnée et un chiffon doux pour nettoyer le fauteuil roulant.

Vérifiez aussi la pression des pneus (4,5 bars).