

Consignes d'utilisation Du lève-personne



Consignes d'utilisation

LES FREINS

Les roues arrière du lève-personne électrique sont équipées de freins individuels. Le blocage des roues s'opère en appuyant légèrement sur le bouton à pied situé au-dessus de chaque roue. Durant la montée du patient, les freins doivent être libres pour permettre à l'appareil de venir se centrer, seul, au niveau du centre de gravité du patient. Dans certains cas, les freins peuvent être utilisés lors de la descente du patient pour immobiliser le lève-personne.

LEVAGE ET DESCENTE

Le contrôle de la montée et de la descente de la potence du lève-personne se fait en sélectionnant le bouton correspondant sur la commande (montée/descente).



LES SANGLES

Pour positionner la sangle sur un patient couché, mettez le patient en position latérale afin de positionner correctement la sangle.

Latéralisez ensuite le patient de l'autre côté afin d'étaler convenablement la sangle.

Remettez le patient sur le dos.

Positionnez la sangle sur le palonnier du lève-personne dans les œillets prévus à cet effet.

En fonction du type de transfert à effectuer, choisissez le type de sangle correspondant.

Pour un transfert couché on privilégiera une sangle hamac avec tête.

Pour un transfert assis on privilégiera une sangle universelle ou en U, sangle qu'il faudra enlever une fois le patient installé.

du lève-personne

LES FREINS



LES BATTERIES

Le lève-personne électrique est alimenté par des batteries, il ne fonctionne pas lorsqu'il est branché sur le secteur. Les batteries doivent être uniquement rechargées avec le chargeur d'origine fourni avec l'appareil.

Le bon fonctionnement du lève-personne nécessite de recharger journalièrement les batteries, de préférence la nuit (le chargeur s'arrête automatiquement lorsque la charge des batteries est maximale : pas de consommation électrique inutile).

Pour charger la batterie : branchez le chargeur, fermez le capot du chargeur et branchez le câble d'alimentation secteur.

A noter que l'utilisation des fonctions électriques du lève-personne quand il est en charge accroît le risque d'altérer la carte-mère.

ENTRETIEN

Il est recommandé d'utiliser quotidiennement une éponge légèrement humide ou une lingette imprégnée et un chiffon doux pour nettoyer le lève-personne. Les sangles peuvent être lavées en machine (voir notice).

INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

En cas de problème, vérifiez que tous les câbles d'alimentation soient bien branchés et/ou qu'ils ne soient ni arrachés ni coupés. La batterie doit être chargée et le bouton rouge d'arrêt d'urgence ne doit pas être en position enfoncée. Si le problème subsiste, contactez-nous.