

Consignes d'utilisation Du lit médicalisé



Consignes d'utilisation

LES FREINS

Le blocage des roues s'effectue en appuyant sur le bouton à pied situé au-dessus de chaque roue lorsque le lit est équipé de freins individuels. Le blocage des roues s'effectue en appuyant sur une pédale disposée sur le côté du lit, lorsqu'il est équipé de freins centralisés. Pour plus de sécurité, une fois le lit immobilisé, il peut être bloqué grâce à son système de freinage.

Lorsque le lit est immobilisé, il convient de bloquer les roues



BARRIERES PLIANTES EN EPOXY

Pour la montée : poussez vers l'avant jusqu'au blocage automatique.

Pour la descente : tirez sur le bouton à l'arrière de la barrière et accompagnez la descente en la maintenant.

BARRIERES EN BOIS


Pour la montée : soulevez la partie haute de la barrière jusqu'au blocage automatique.

Pour la descente : soulevez la partie haute pour débloquer la barrière et ramenez les gâchettes vers le centre pour amorcer la descente.

du lit médicalisé

CONSEILS TELECOMMANDE

LES FREINS

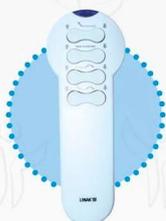

Le réglage de la hauteur du lit et du relèvement buste se fait en utilisant le bouton correspondant sur la commande (montée/descente).

La potence, permettant de s'asseoir, de se lever ou de se soulever pour adopter une position plus confortable peut être électrique (selon modèles).

Le réglage du relèvement-jambes mécanique se fait en tirant celui-ci vers le haut à l'aide des poignées latérales.

Le déverrouillage du relèvement-jambes mécanique se fait, selon les modèles, soit en levant le relèvement-jambes à son maximum, soit en actionnant le levier prévu à cet effet. Les fonctionnalités du relèvement-jambes peuvent être électriques (selon modèles).

PRECAUTIONS D'UTILISATION

- Avant de déplacer le lit, veillez à débrancher la prise de l'alimentation secteur.
- Assurez-vous que la télécommande et son câble ne soient pas en contact avec le sol si vous devez déplacer le lit.
- Pendant le déplacement du lit, veillez à ce que la télécommande et le câble d'alimentation ne soient pas en contact avec le sol et les roulettes.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation ne puisse pas être coincé ou endommagé de quelque façon que ce soit.
- Bloquez correctement les deux barrières latérales.

ENTRETIEN

- Il est recommandé d'utiliser hebdomadairement une éponge légèrement humide ou une lingette imprégnée et un chiffon doux pour dépoussiérer le lit.

INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

En cas de problème, vérifiez que tous les câbles d'alimentation soient bien branchés et/ou qu'ils ne soient ni arrachés ni coupés. Si le problème subsiste, contactez-nous.